


Figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, mielőtt a tesztet elvégezné különben a kapott teszteredmény téves lehet.

Tartalom

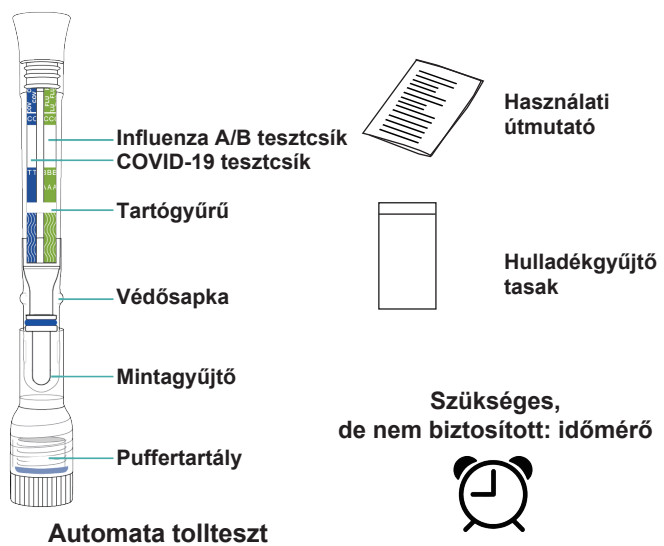

Tárolás és stabilitás

1. Felhasználásig tárolja a COVID-19 & Influenza A/B Antigen Orrlyukas Öntesztkészletet 2 - 30°C között.
2. NE FAGYASSZA LE.
3. A készlet tartalma a külső csomagoláson és a tégelyen feltüntetett lejárati időig stabil.
4. Eltartható: 24 hónap.

Tesztelés előtt


1. Vegye ki a tolltesztet a csomagolásából. Az a legjobb, ha felbontás után 1 órán belül el is végzi a tesztet.
2. Legalább 20 másodpercen keresztül szappanos vízzel mosson kezet, vagy használjon kézfertőtlenítőt.

Megjegyzés


!!! A 2 és 18 év közötti gyermekek tesztelését felnőttnek kell felügyelnie vagy segítenie.
!!! Két évnél fiatalabb gyermeket nem szabad ezzel az eszközzel tesztelni.
!!! Óvatosan helyezze az eszköz mintagyűjtőjét az orrüregbe.

A mintavétel menete


1. Húzza le a tolltesztet az extrakciós csőről.

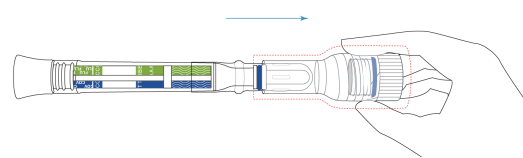


2. Vegye le róla a védősapkát.

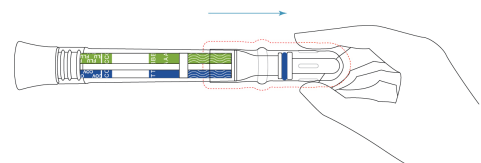

3. Óvatosan dugja be a mintagyűjtőt az orrüregbe addig, amíg ellenállásba nem ütközik (kb. 1-2 cm mélyre az orrüregbe). Nyomja hozzá a mintagyűjtőt az orrüreg falához és közben forgassa meg ötször.

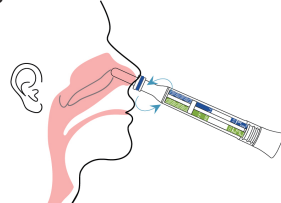

4. Kissé csavarja meg a tolltesztet, miközben kihúzza az orrüregből.

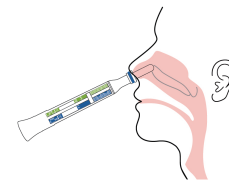


5. Ismétlje meg a mintavételi eljárást a másik orrüregben is, hogy mindkét orrüregből elegendő minta álljon rendelkezésre.

FIGYELEM: A teszt akkor lehet pontatlan, ha nem megfelelő a mintavétel.


Megjegyzés: Gyermekeknél a maximális mintavételi mélység kevesebb, mint 2 cm, és előfordulhat, hogy egy második személyre is szükség lesz, aki tartja a gyermek fejét a tamponálás során. Ez kissé kellemetlen érzés lehet. Ne vezesse mélyebbre az eszközt, ha erős ellenállást érez.

A minta kiértékelése


1. Addig nyomja bele a teszteszközt függőlegesen az extrakciós csőbe, amíg a cső felső szélé el nem éri a tartógyűrű tetejét.

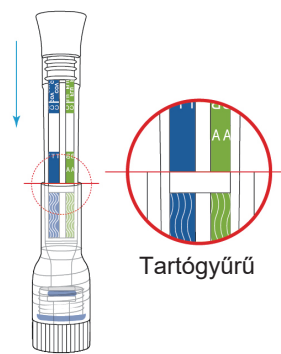

FIGYELEM: A teszteszközt úgy tegye függőlegesen csőbe, hogy annak pereme érje el a tartógyűrű közepét. Ellenkező esetben nincs oldaláramlás, ami téves vagy érvénytelen eredményt adhat.

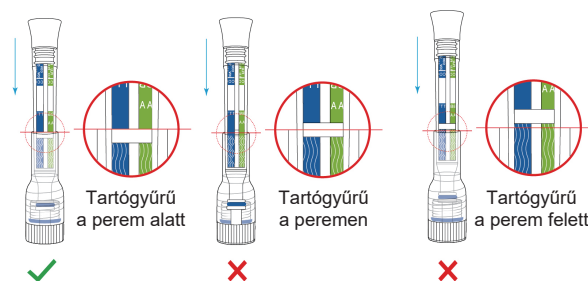


2. Olvassa le az eredményt 15 perc elteltével. 30 perc múlva már ne olvassa le az eredményt.

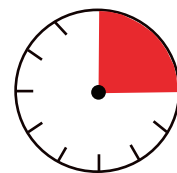

3. A tesztelés befejeztével tegye az elhasznált tesztet a hulladékgyűjtő tasakba, és a helyi előírásoknak megfelelően dobja ki azt.


Az eredmény értelmezése

COVID-19 teszt:

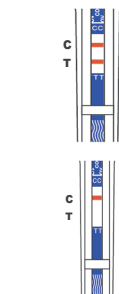

POZITÍV:

Két színes csík jelenik meg a membránon. Az egyik a kontroll régióban (C), a másik a teszt régióban (T).

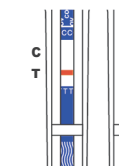


NEGATÍV:

Csak egy színes csík jelenik meg, a kontroll régióban (C). A teszt régióban (T) nincs csík.

ÉRVÉNYTELEN:


A kontrollcsík nem jelenik meg. Minden olyan teszteredményt, amely a megadott leolvasási időben nem hozott létre kontrollcsíkot, ki kell dobni. Kérjük, újra olvassa el a teszteljárást, és ismétlje meg azt egy új teszttel. Ha a teszt továbbra is érvénytelen, konzultáljon orvosával vagy keressen fel egy COVID-19 tesztközpontot.

Influenza A/B

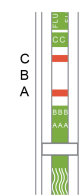


Influenza A Pozitív:

Két színes csík jelenik meg a membránon. Az egyik a kontroll régióban (C), a másik az A-régióban (A).

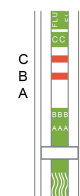

Influenza B Pozitív:

Két színes csík jelenik meg a membránon. Az egyik a kontroll régióban (C), a másik a B-régióban (B).

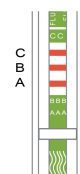


Influenza A+B Pozitív:

Három színes csík jelenik meg a membránon. Az egyik a kontroll régióban (C), a másik az A-régióban (A), a harmadik a B-régióban (B).


Megjegyzés: Az A és B influenza együttes fertőzése ritka. Az olyan klinikai mintát, amely mind az A-ra, mind a B-re pozitív eredményt ad, érvénytelen eredménynek kell tekinteni, és egy másik tesztet kell elvégezni. Ha a teszt ismét pozitív mind az A, mind a B influenzára, a mintát az eredmények jelentése előtt más módszerrel újra kell vizsgálni.

Influenza A+B Negatív:

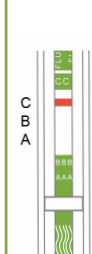

Csak egy színes csík jelenik meg, a kontroll régióban (C). Sem az A, sem a B-régióban nincs csík.

Influenza A+B Invalid:

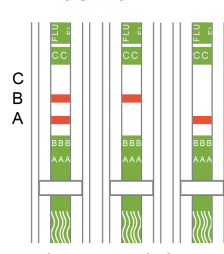

A teszt érvénytelen, ha a kontroll régióban (C) nem jelenik meg a színes csík, függetlenül attól, hogy van-e csík az A vagy B-régióban vagy sem. Ismétlje meg a tesztet egy új teszttel és új mintával. Az elégtelen mintamennyiség, a pontatlan teszteljárás vagy a lejárt teszt érvénytelen eredményt okozhat. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon a helyi forgalmazóhoz.

MEGJEGYZÉS:

- (1) A szín intenzitása a vizsgálati területen (T) változhat. Azonban a vizsgálati területen látható bármilyen árnyalatot pozitívnak kell tekinteni. Vegye figyelembe, hogy ez csak minőségi teszt, és a mintában lévő víruskoncentráció ezzel a teszttel nem határozható meg.
- (2) A pozitív teszteredmény azt jelenti, hogy a COVID-19 és/vagy influenzát okozó vírus kimutatható a mintában, és nagyon valószínű, hogy a tesztelt személy COVID-19 és/vagy influenzával fertőzött és fertőző. Kérjük, azonnal forduljon orvosához, és tartsa be a karanténra vonatkozó helyi irányelveket. Egészségügyi szolgáltatója a vizsgálati eredmények, valamint a kórtörténet és a tünetek alapján együtt fogja meghatározni, hogy miként lehet a legjobban gondoskodni Önről. Ne hozzon semmilyen orvosi szempontból releváns döntést anélkül, hogy előzetesen ne konzultálna kezelőorvosával.
- (3) A negatív teszteredmény azt jelenti, hogy a COVID-19 és/vagy influenzát okozó vírus antigénjei nem mutathatók ki a mintából. A negatív eredmény nem zárja ki a COVID-19 és/vagy az influenzafertőzést. Ez azt jelenti, hogy megvan az esélye annak, hogy ez a teszt negatív eredményt ad, ha Ön COVID-19 és/vagy influenzavírussal fertőzött. Ha a teszt negatív, és továbbra is COVID-19 és/vagy influenzaszerű tüneteket tapasztal: láz, köhögés és/vagy légszomj, akkor forduljon kezelésért orvosához.

